

Ghid de utilizare

Masca de protectie faciala cu filtru KN95




■ Non-Medical

Clemă de nas ajustabilă - Bandă elastică pentru ureche, se poartă pentru timp îndelungat fără a strânge urechile - Design ergonomic, se potrivește perfect pe față - Din burete moale, confortabil de purtat - Material interior cu rată de filtrare KN95.

Pentru sanatatea dumneavoastra, inainte de utilizare va sugeram sa urmati 3 pasi:

- 1. Asigurati-va ca intreaga suprafata a mastii nu a fost deteriorata sau serios contaminata.
- 2. Nu sunt deteriorate snurile de prindere pe urechi si au o elasticitate buna.
- 3. Nu este deteriorata sau rupta clema de prindere pe nas.

Modalitatea corecta de purtare, urmati acesti pasi atunci cand purtati o masca cu prindere dupa ureche:

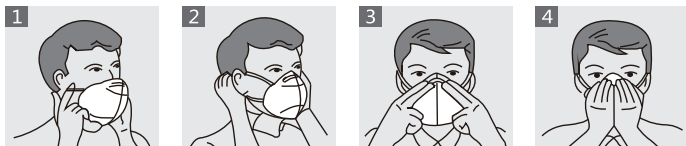

- 1. Prindeti clema de prindere pentru nas de deasupra mastii si asezati masca pe barbie.
- 2. Trageti banda elastica peste ureche si pozitionati masca cat mai confortabil posibil.
- 3. Miscati masca in ambele parti in jurul cemei si apasati pana cand clema se aseaza bine pe nas.
- 4. Verificati etanseitatea dintre masca si fata.

Conditii de depozitare a mastii

Pastrati masca intr-un loc curat, aerisit si uscat. Nu o pastrati alaturi de articole toxice, periculoase si cu miros puternic. Tineti-o departe de foc.

Durata recomandata de utilizare: Nu depasiti 8 ore de utilizare continua.

Utilizarea corecta a mastii

- 1. Acest produs nu este lavabil. Daca doriti sa il refolositi, ar trebui sa il depozitati corect si sa il pastrati curat.
- 2. Nu este recomandabil sa purtati masca cand aerul nu este circulat, respiratia nu este usoara sau concentratia de oxigen este mai mica de 18% in timpul somnului.

- 3. Cand masca este deteriorata, murdara sau rezistenta respiratorie este semnificativ crescuta, parasiti zona contaminata si reinnoiti masca.
- 4. Nu faceti schimb de masti cu alte persoane.
- 5. Masca ar trebui utilizata cand intervalul de temperaturi este intre $\pm 20^{\circ}\text{C}$ si 38°C , iar umiditatea relativa este mai mare de 80%.

Blocheaza eficient praful, bacteriile si alte particule


Eficienta de filtrare a particulelor cu diametru aerodinamic cuprins intre $0.075\ \mu\text{m} \pm 0.020\ \mu\text{m}$ poate fi de peste 95%

Permeabilitate puternica

Tip filtru auto-amorsare

Material rezistent

Caracteristici produs: bara externa pentru nas/bara interna pentru nas (reglabil, nu afecteaza efectul utilizarii)

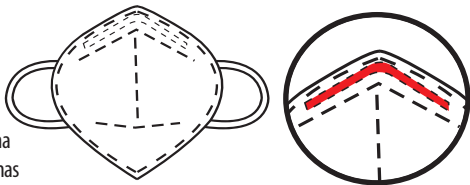

Parametrii produsului Informatii oferite de producator:

Denumirea produsului: Masca KN95

Brand: GUANGYI

Model: FH-2020 (FH-2023)

Parti filtru: GB2626-2006 KN95

Standard produs: GB2626-2006

(Filtru respirator cu auto-aspirare impotriva particulelor)

Specificatii produs: 1 bucata/pachet

Durata de depozitare: 3 ani

CERTIFICARE Personal de verificare 00180

Producator: HUIZHOU YUNJIAN TECHNOLOGY CO. LTD



Splaiul Unirii, nr. 247-251, sect. 3, cod 030137, Bucuresti

Tel: 021.410.95.58 / 021.410.05.83; Fax: 021.411.63.47

store.falcon.ro